


PACCHETTO INFORMAZIONI STANDARD

(Allegato alla scheda tecnica)

- | | |
|---|---|
| 1. Produttore: | Soft N.W. S.p.A. |
| 2. Codice e nome dispositivo: | MAS004 – Mascherina Al Pasa Nen Piega 2 |
| 3. Manutenzione | Non prevista. Dispositivo monouso. |
| 4. Indicazione sulle modalità di conservazione e/o manipolazione | Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto. |
| 5. Istruzioni specifiche di utilizzo: | Modalità di uso (indossare e rimuovere le mascherine): |

Prima di indossare una mascherina, lavarsi le mani con un disinfettante, un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. Indossare la mascherina con le pieghe rivolte verso l'interno;

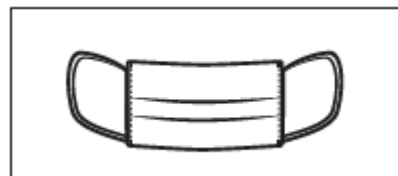


Coprirsi la bocca e il naso con la mascherina e assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina. È importante che aderisca su tutta la superficie;



Evitare di toccare la mascherina durante l'utilizzo. Se lo fate, lavarsi nuovamente le mani;



Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida – per uno starnuto o per essere entrata in contatto con la saliva – e non riutilizzare le mascherine monouso;

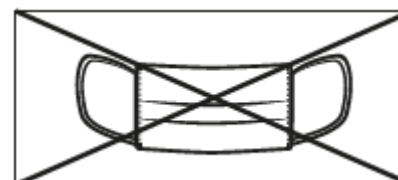

Quando volete rimuovere la mascherina fatelo da dietro, senza toccare la parte anteriore della mascherina. Poi gettatela immediatamente in un contenitore chiuso;



Lavarsi di nuovo le mani dopo aver gettato la mascherina.



- 6. Avvertenze e/o precauzioni da prendere**

Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali tessuto anneggiato, bucato o scucito.
- 7. Metodo di sterilizzazione (nel caso di dispositivo sterile)**

Dispositivo non sterile
- 8. Le controindicazioni e/o avvertenze**

Non ci sono particolari controindicazioni o interazioni nell'utilizzo di questo dispositivo.
- 9. Modalità di trasporto**

Non ci sono particolari osservanze a cui attenersi nel trasporto; durante il trasporto, delle mascherine, devono comunque essere rispettate le indicazioni sulle modalità di conservazione e/o manipolazione (punto 4).
- 10. Modalità di smaltimento**

Dopo l'uso, i dispositivi monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati.

Per le "abitazioni" in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo le mascherine utilizzate dovranno essere smaltite nei rifiuti indifferenziati.

Per lo smaltimento delle mascherine, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.

Si raccomanda l'utilizzatore di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come procedure in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Nel caso in cui si optasse, durante il periodo della pandemia, per modalità di gestione maggiormente cautelative, i dispositivi usati nei luoghi di lavoro dovrebbero essere gestiti come "rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo". Per lo smaltimento dovrebbero essere utilizzati appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 l. La registrazione deve avvenire entro 5 gg.
- 11. Confezione e imballo**

Tipo di imballaggio plastica
N. 1 o 10 mascherine per confezione